

Pompa pentru san

Alimentarea la sân este cea mai bună alegere pentru dvs și copilul dvs! Extragerea laptelui cu pompa de sân manuală este uneori necesară pentru dvs și copil. Laptele matern își schimbă proprietățile și compoziția în mod natural pentru a întâmpina nevoile de nutriție ale copilului la fiecare stadiu de dezvoltare. Alăptatul ajută sânul să se contracte la dimensiunile prenatale.

Caracteristici:

- ușor de folosit și asamblat, portabilă și silențioasă
- pâlnia pompei este confortabilă, moale și asigură extragerea ușoară a laptelui
- pompa se poate acționa cu o singură mână
- vă permite să vă hrăniți copilul oricând și oriunde
- este ușor de ținut și de curățat
- mânerul pompei este ușor de ținut și de acționat

Curățare și Sterilizare:

- spălați accesoriile și biberonul în apă caldă cu săpun înainte de sterilizare (pentru a elimina urme de lapte)
- curățați cu atenție componentele de orice resturi
- sterilizați pompa în soluție sterilizatoare pentru biberone, în sterilizatorul cu aburi (max. 100°C) sau prin introducerea în apă clocotită pentru 4-5 minute.
- nu spălați sau curățați în solvenți sau substanțe chimice

ATENȚIE:

- verificați starea părților componente la fiecare utilizare.
- aruncați componentele care sunt deteriorate sau perforate
- **NU ÎNCĂLZIȚI BIBERONUL ÎNCHIS ERMETIC ÎN CUPTORUL CU MICROUND**
- pentru încălzirea hranei în cuptorul cu microunde îndepărtați tetina, capacul și discul înainte. Verificați temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.
- nu lăsați copilul nesupravegheat în timpul hrănirii
- nu folosiți tetinele în loc de suzete.
- această pompă a fost verificată pentru a putea fi sterilizată în majoritatea modelelor de sterilizatoare și mașini de spălat vase.
- Biberonul conform cu EN14350